


SCHIENEN PFLEGE

01 VOR DEM EINSETZEN

Zur Vermeidung von Bruchgefahr empfehlen wir die Schiene vor dem Einsetzen für **CA. EINE MINUTE IN WARMES (MAX. 50°C) WASSER** zu legen.

Somit wird die Schiene angenehm elastisch und lässt sich spannungsfrei einsetzen.

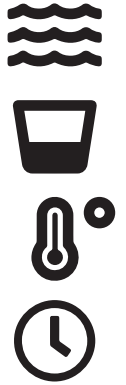

02 REINIGUNG

Zur Reinigung verwenden Sie am besten eine **WEICHE (ZAHN)BÜRSTE MIT PROTHESENZAHN-CREME ODER SPÜLMITTEL**.

Spülen Sie die Schiene unter **KALTEM WASSER** ab und lagern sie diese trocken.

Bitte verzichten Sie auf Zahncreme oder Reinigungsmittel mit harten Putzkörpern. Diese beeinflussen die Oberflächengüte und rauhen das Schienematerial an.



03 LAGERUNG

Nach der Reinigung ist die Schiene in der mitgelieferten Box trocken und gut belüftet aufzubewahren.

